


CARATTERISTICHE AURA S

sferica

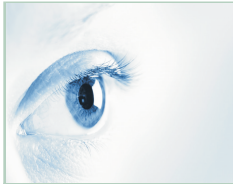

BIOCOMPATIBILITA'

DISIDRATAZIONE LENTA
REIDRATAZIONE RAPIDAASTIGMATISMO
 ≤ 0.75 DSCELTA PARAMETRI
FACILITATA

MATERIALE

GMA-HEMA 49%
(hioxifilcon B)
Filtro UV
Tinta: Light-blue
Durata: 6-12 mesi

GEOMETRIA

AURA S è una lente morbida convenzionale caratterizzata da un materiale (GMA-HEMA 49%) che oltre a garantire un'alta biocompatibilità è particolarmente indicato nei casi di lacrimazione scarsa. La sua disidratazione è molto lenta, mentre il ritorno ad una completa reidratazione è particolarmente veloce. Viene prodotta per tornitura avvalendosi di tecnologie dalla precisione nanometrica. Il profilo della superficie posteriore è bicurvo sferico, mentre quello anteriore è sferico. L'ottimizzazione degli spessori adottati la rende assolutamente confortevole. AURA S ha un design moderno e si distingue per la sua ampia possibilità di ricettazione.

PROFILO



METODOLOGIA APPLICATIVA

Parametri

Criteri di scelta

 $r0 = 8.10 \div 9.30$ step 0.30 mm $r0 = Km + 0.80$ mm se $\varnothing T \pm 0.50$ $r0 = \pm 0.20$ $\varnothing T = 14.00 \div 15.00$ step 0.50 mm $\varnothing T = \varnothing_{\text{corneale}} + 2.5$ mm $Fv = \pm 25.00$ D step 0.25 D

Valore sfero occhiale portato al vertice

CARATTERISTICHE AURA TD

torica



BIOCOMPATIBILITA'

DISIDRATAZIONE LENTA
REIDRATAZIONE RAPIDAASTIGMATISMO
 $-0.75 \div +5.50$ DSCELTA PARAMETRI
FACILITATA


MATERIALE:

GMA-HEMA 49%
(hioxifilcon B)
Filtro UV
Tinta: Light-blue
Durata: 6-12 mesi

GEOMETRIA

AURA TD è una lente morbida convenzionale caratterizzata da un materiale (GMA-HEMA 49%) che oltre a garantire un'alta biocompatibilità è particolarmente indicato nei casi di lacrimazione scarsa. La sua disidratazione è molto lenta, mentre il ritorno ad una completa reidratazione è particolarmente veloce. Viene prodotta per tornitura avvalendosi di tecnologie dalla precisione nanometrica. Il profilo della superficie posteriore è torico, mentre quello anteriore è sferico. La stabilizzazione è di tipo dinamico simmetrico mediante smussi contrapposti con tecnica Slab-off. AURA TD ha un design moderno e si distingue per la sua ampia possibilità di ricettazione. Si può richiedere con stabilizzazione statica mediante prisma di Ballast (AURA TS).

PROFILO

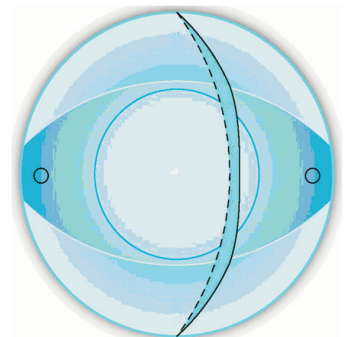

METODOLOGIA APPLICATIVA

Parametri

Criteri di scelta

 $r0 = 8.10 \div 9.30$ step 0.30 mm $r0 = Km + 0.80$ mm se $\varnothing T \pm 0.50$ $r0 = \pm 0.20$ $\varnothing T = 14.00 \div 15.00$ step 0.50 mm $\varnothing T = \varnothing_{\text{corneale}} + 2.5$ mm $Fv = \pm 25.00$ D step 0.25 D

Valore sfero occhiale portato al vertice

Cilindro $-0.75 \div -5.50$ D step 0.25 D

Esame refrattivo

Asse $0^\circ \div 175^\circ$ step 5°

Esame refrattivo